



Profesjonalny, ekologiczny manekin osoby dorosłej treningu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Skrócona instrukcja użytkowania:

I) Pierwsze użycie

1. Wyjmij manekin z pudełka transportowego;
2. Ułóż manekin na twardej, płaskiej, suchej powierzchni;
3. Zainstaluj jednorazowy worek płucny;
4. Przed rozpoczęciem treningu sprawdź czy ruchome elementy głowy manekina znajdują się w prawidłowej pozycji wskazanej na rysunku.



Wersja
online
instruction

II) Instalacja jednorazowego worka płucnego:

Zanim zainstalujesz worek płucny sprawdź czy nie jest uszkodzony:

W celu instalacji jednorazowego worka płucnego należy (zwróć uwagę na rysunki na końcu instrukcji):

1. Podtrzymując, obrócić manekina na bok;
2. Delikatnym ruchem przeciągnąć zwiniętą ustną część worka płucnego przez kanał przebiegający przez szyję i głowę manekina;
3. Delikatnym ruchem przeciągnąć zwiniętą płucną część worka płucnego przez kanał prowadzący do przegrody na plecach manekina;
4. Rozłożyć każdą część worka płucnego tak, aby uniknąć jakichkolwiek zagięć;
5. Ułożyć manekin do pozycji wyjściowej;
6. Przyczepić część ustną worka do twarzy manekina zawijając część ustną na wewnętrzną część twarzy (część ustną należy przykleić używając dołączonych taśm klejących).

III) Wymiana worka płucnego:

Jednorazowy worek płucny powinien być użytkowany wyłącznie przez jednego ćwiczącego i wymieniany po sesji treningowej tego ćwiczącego

W celu wymiany jednorazowego worka płucnego należy:

1. Podtrzymując obrócić manekin na bok i delikatnym pociągnięciem wysunąć część worka znajdującą się w przegrodzie na plecach manekina;
2. Delikatnym pociągnięciem wysunąć worek płucny z kanału przebiegającego przez szyję i głowę manekina;
3. Zainstalować nowy jednorazowy worek płucny;

4. Ułożyć manekin do pozycji wyjściowej;
5. Sprawdzić czy ruchome elementy głowy manekina znajdują się w prawidłowej pozycji wskazanej na rysunku.

IV) „ECO CPR daje drugie życie” - ponowne wykorzystanie sprężyn.

Usuwanie sprężyn uciskowych po zakończeniu cyklu użytkowania produktu:

Manekin ECO CPR służy do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i tym samym uczy ratować ludzkie życie. Program „ECO CPR daje drugie życie” wspiera także dobro planety i środowiska naturalnego. Po zakończeniu cyklu użytkowania produktu możesz odzyskać jego „serce”, w którym znajdują się sprężyny uciskowe i odesłać je na adres producenta.

V) Usuwanie sprężyn uciskowych:

1. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, przetnij boczną powierzchnię manekina wzdłuż perforacji;
2. Otwórz tors manekina odchylając górną powierzchnię klatki piersiowej na przeciwległy do linii cięcia bok w celu uwidocznienia sprężyn uciskowych;
3. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, wyjmij po kolei każdą ze sprężyn z wnętrza manekina.

WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- manekin należy utrzymywać w czystości;
- manekin nie może być przechowywany ani używany w wilgotnym otoczeniu;
- jednorazowy worek płucny powinien być wymieniany po każdym ćwiczącym (jeśli prowadzone są wdechy ratunkowe);
- żadnej części manekina nie należy czyścić ani dezynfekować z użyciem płynów czy wilgotnych chusteczek;
- drobne zabrudzenia należy usuwać suchą ściereczką;
- zastosowanie dodatkowych osłon twarzy na manekinie (wyłącznie płaskie wersje szkoleniowe z filtrem, kompatybilne z manekinem ECO CPR), może zapewnić dodatkową barierę ochronną podczas ćwiczeń wdechów ratunkowych;
- trening resuscytacji należy wykonywać wyłącznie po ułożeniu manekina na twardej, płaskiej i suchej powierzchni, w pozycji leżącej wskazanej na rysunku;
- uciśnięcia klatki piersiowej należy wykonywać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi resuscytacji, kierując siłę ucisku wyłącznie pod kątem 90 stopni do podłoża;
- ze względu na właściwości fizyczne tektura może w trakcie użytkowania się rozwarstwiać.;
- rozwarstwienie tektury nie wpływa na jego funkcjonalność i nie wyklucza fantoma z dalszego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
- w wyniku przeprowadzonych testów
- funkcjonalność fantoma zostaje zachowana nawet po wykonaniu 100 tys. uciśnień klatki piersiowej.

Podczas ćwiczeń unikaj stosowania czynników mogących odbarwić lub uszkodzić manekin:

- pigmentów ze szminek i kosmetyków;
- pigmentów długopisów i flamastrów;
- mokrych lub nasiąkniętych tkanin;
- mokrych lub wilgotnych dłoni;
- elektrod do defibrylatorów szkoleniowych, innych niż zalecane przez producenta manekina.

Utylizować zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w danym kraju.

Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem.

W przypadku dodatkowych pytań odwiedź naszą stronę www.ecocpr.pl lub napisz: info@ecocpr.pl

